



Comment utiliser le destructeur d'aiguilles ?



Bayer HealthCare
Bayer Schering Pharma

Bayer santé
Bayer Schering Pharma
220 avenue de la Recherche
59120 Loos
www.bayerscheringpharma.fr



Comment utiliser le destructeur d'aiguilles ?



Le destructeur d'aiguilles est uniquement conçu pour la destruction des aiguilles (30 gauges) des seringues ci-dessous. **N'utilisez jamais l'appareil pour détruire une autre aiguille que celle-ci.** Lisez attentivement la notice avant utilisation. Ne pas laisser à la portée des enfants.



BETAPLUS®

Description de l'appareil

Le destructeur d'aiguilles est un dispositif destiné à l'incinération des aiguilles des seringues identiques à l'image ci-dessous.



Cet appareil utilise un arc électrique pour brûler à 1500° les aiguilles et les faire fondre, **prévenant ainsi tout risque de piqûre ultérieure et réduisant le risque d'infection.**

Le destructeur d'aiguilles Betaplus® est fourni avec un adaptateur secteur (220 Volts) et dispose d'une batterie Lithium.

Le destructeur d'aiguilles doit être rechargé lorsque la diode jaune s'allume en cours d'utilisation.

Avant la 1^{ère} utilisation

- 1) Connectez le chargeur à l'appareil et branchez-le sur le secteur (prise 220 Volts).
- 2) Chargez l'appareil pendant 12 heures (ou toute la nuit).

Le destructeur d'aiguilles peut alors être utilisé sans être branché sur le secteur et dispose d'une autonomie de 30 à 40 destructions.

Si l'appareil n'a pas été utilisé récemment, chargez-le à nouveau.



Connecteur du chargeur



Témoin de fonctionnement de l'appareil


Témoin de décharge

Réceptacle de l'aiguille/seringue


Bouton d'activation

Notice d'utilisation


1 Insérez la seringue

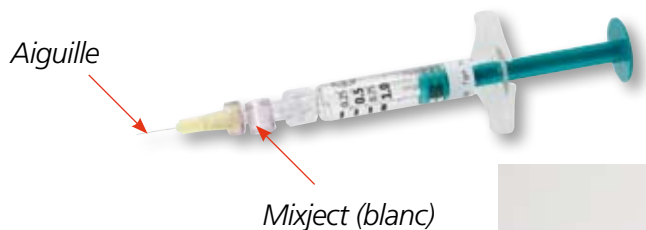

Insérez l'aiguille dans l'ouverture au centre de l'appareil (réceptacle).

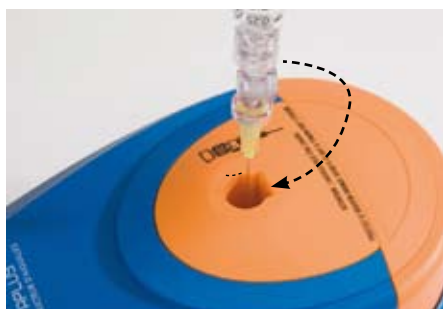

Veillez à ce que l'**excroissance** du mixject soit orienté vers la partie carrée de l'ouverture.

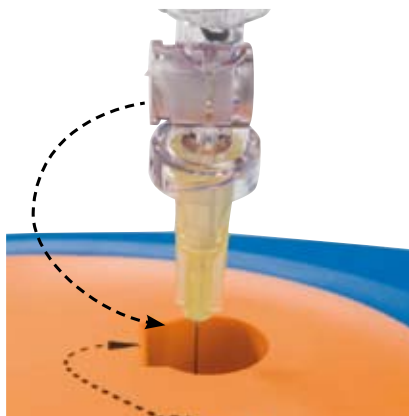

Vérifiez que la seringue est totalement insérée dans l'ouverture.

Si vous sentez une résistance, ne forcez pas et vérifiez le sens d'introduction.

2 Pressez le bouton

Appuyez fermement sur le bouton d'activation et **maintenez-le enfoncé** jusqu'à l'extinction du témoin vert.


Attendez quelques secondes avant d'enlever la seringue.



5

3 Contrôlez l'aiguille

Vérifiez que l'aiguille est correctement détruite (présence d'une boule de métal ou disparition totale de l'aiguille).

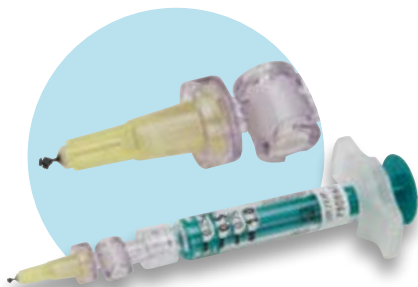

Précautions d'usage

Ne touchez pas l'aiguille lorsque vous la retirez de l'appareil, elle peut être encore chaude.

N'utilisez pas le destructeur d'aiguilles s'il est entré en contact avec de l'eau ou un fluide. Conservez-le dans un endroit sec à température ambiante et hors de portée des enfants.

En cas de dysfonctionnement

Si l'aiguille n'est pas détruite lorsque vous la retirez de l'appareil :

- Vérifiez que vous avez **correctement inséré la seringue** dans l'ouverture au centre de l'appareil.
- Vérifiez que le **témoin de charge (témoin jaune) ne s'allume pas** lorsque vous appuyez sur le bouton d'activation. Si celui-ci s'allume, chargez votre destructeur d'aiguilles au minimum 90 minutes et recommencez la destruction de votre aiguille.
- Vérifiez que vous n'avez pas relâché trop tôt le bouton d'activation. Pour cela réinsérez l'aiguille dans l'appareil, appuyez sur le bouton d'activation et relâchez-le **une fois le témoin vert éteint**.

Si malgré ces vérifications, l'aiguille n'est pas totalement détruite, jetez la seringue dans un collecteur de seringues usagées et contactez votre infirmière.

Une infirmière vous remplacera votre destructeur d'aiguilles.

Conseils additionnels

Si vous devez détruire une aiguille pliée, redressez-la en utilisant l'ouverture entre les 2 témoins lumineux.

Une fois l'aiguille parfaitement alignée avec le reste de la seringue, procédez à la destruction de l'aiguille.

Pour toute question sur le destructeur d'aiguilles Betaplus[®], contactez votre infirmière.

7

Le destructeur d'aiguilles est produit par
American Scientific Resources Inc.
et délivré gratuitement aux patients par
Bayer Schering Pharma.



American Scientific Resources Inc



Bayer HealthCare
Bayer Schering Pharma

Cet appareil répond aux directives Européennes 93/68/EEC et 2004/108/EEC relatives aux appareils faibles voltages et à la compatibilité électromagnétique. Il est ainsi en conformité avec la législation Européenne et dispose ainsi d'un marquage CE.